

Forget Me Not フォゲットミーノット

指の止血帯用




- 再利用可能
- フリーサイズ
- 1箱10個入

カイロブロックの指固定をサポート



- 鮮明な黄色が手術後の外し忘れを防ぎます

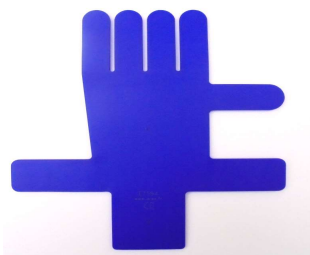

S-FLX-101-01
CHIROBLOC ラージ

医療機器届出番号
29B2X10008FLX104



S-FLX-101-02
CHIROBLOC スモール

医療機器届出番号
29B2X10008FLX104



S-FLX-101-03
フォゲットミーノット

医療機器届出番号
29B2X10008FLX109



S-FLX-101-04
CHIROBLOC ベース

医療機器届出番号
29B2X10008FLX112

※写真は使用例

※本カタログに掲載の仕様、形状は改良等の理由により予告なしに変更する場合がございます。

製造販売元：



【本社】〒630-0142

奈良県生駒市北田原町1067-25

Tel.0743-72-3388 Fax.0743-72-3988

【大阪オフィス】〒541-0059

大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-8

堺筋MS第二ビル 10階

Tel.06-6226-8308




ISO13485:2003
認証取得事業所




認証番号0013044


フォゲットミーノットで「止血帯」を作る

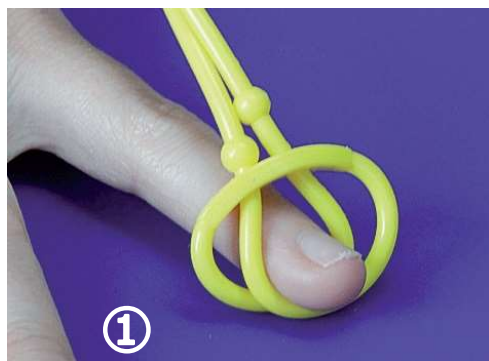

①中央のプレートにある2つの穴に両端を通し、ループを1個か2個作ります

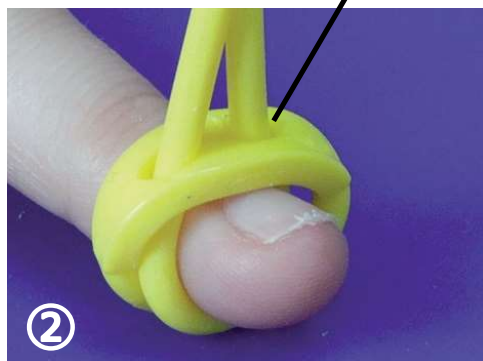

②両端をひっぱり、縛って固定します

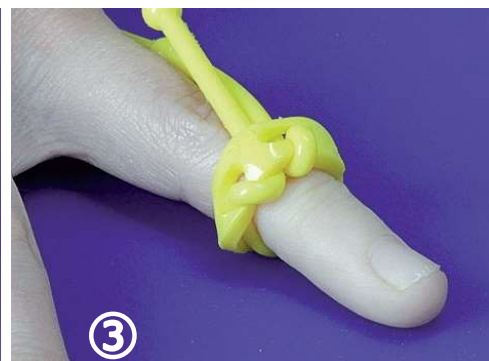

③プレートをひっくり返します



④手術をおこなう準備がととのいました



⑤取り外しは簡単です。真ん中の結び目を緩めて取り外します。滅菌すれば再度使用可能です